




ИМПЛАНТАТ DFI ДОСТОЯНИЕ КЛАССИКИ

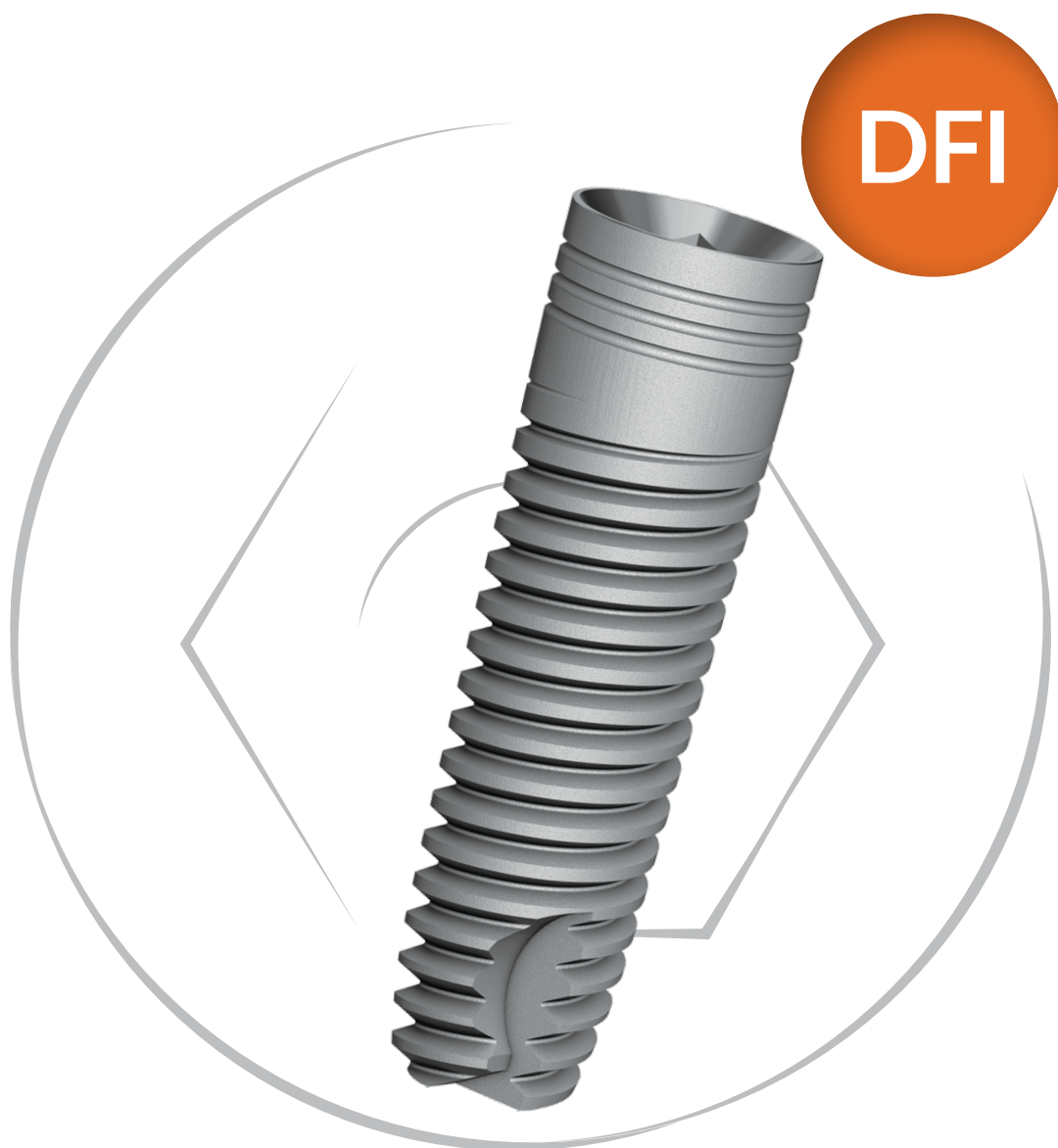

НОВИНКА



Соединение
с внутренним
шестигранником




Стандартное
коническое
соединение



Имплантат DFI компании Alpha-Bio Tec – это достояние классики, в его производстве используется технология, которая зарекомендовала себя как метод обеспечения долговечных и надёжных клинических результатов и оптимального комфорта и ухода для пациентов. Теперь имплантат DFI выпускается уже с двумя типами платформы – с внутренним шестигранным и стандартным коническим соединением.

Имплантат DFI имеет цилиндрическую форму с плавным конусом, он имеет широкий спектр клинических показаний, подходит для кости разного типа и сконструирован специально таким образом, чтобы обеспечивать долгосрочную стабильность и предсказуемые эстетические результаты.

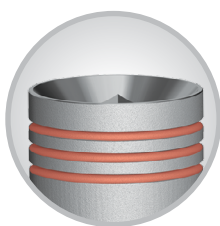


КОРОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Конструктивные характеристики

- Микрокольца
- Шероховатая поверхность

Клинические преимущества

- Уменьшение убывания кости вокруг имплантата
- Снижение давления на вершину альвеолярного гребня
- Увеличение площади контактной поверхности между костью и имплантатом (BIC)

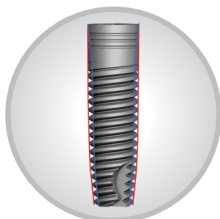


ТЕЛО И СТЕРЖЕНЬ ИМПЛАНТАТА

Конструктивные характеристики

- Цилиндрическое тело имплантата
- Имеющая небольшую конусность апикальная часть
- Увеличенная площадь поверхности
- Сочетание параллельных стенок и конической верхушки

Клинические преимущества

- Плавное и контролируемое продвижение имплантата в кости
- Хорошая первичная стабильность
- Увеличенная площадь контактной поверхности между костью и имплантатом (BIC)
- Эффективное распределение нагрузки

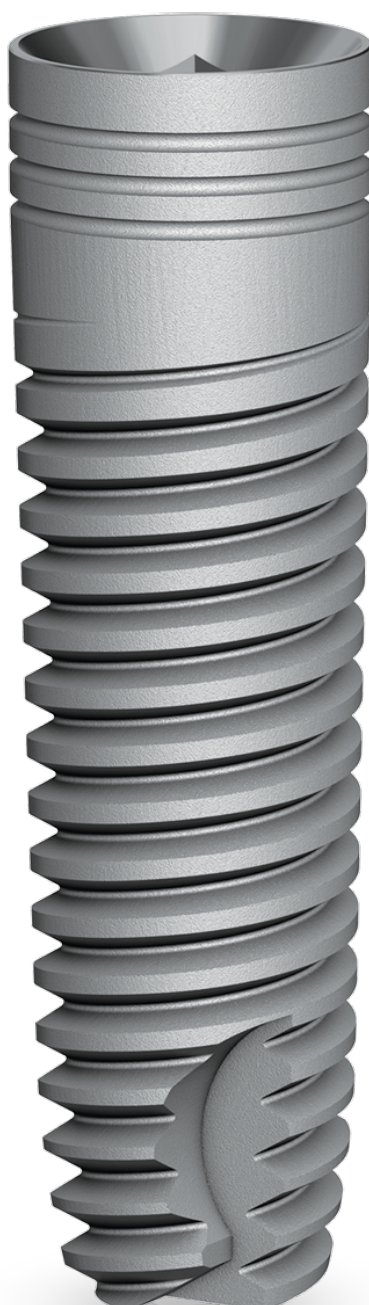

РЕЗЬБА ИМПЛАНТАТА

Конструктивные характеристики

- Переменный шаг резьбы
- Резьба в два захода с расстоянием в 1,2 мм между витками

Клинические преимущества

- Плавное и контролируемое продвижение имплантата в кости
- Хорошая первичная стабильность
- Увеличенная площадь контактной поверхности между костью и имплантатом (BIC)
- Эффективное распределение нагрузки благодаря сочетанию параллельных стенок и конической верхушки



АПИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Конструктивные характеристики

- Острая резьба
- Режущий желобок
- Плоская верхушка

Клинические преимущества

- Плавное и контролируемое продвижение имплантата в кости
- Хорошая первичная стабильность


НОВИНКИ! СОЕДИНЕНИЕ ИМПЛАНТАТ-АБАТМЕНТ И УПАКОВКА ИМПЛАНТАТА



НОВИНКА! ИМПЛАНТАТ DFI С КОНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ

Коническое соединение сообщает имплантату следующие механические и биологические преимущества:

- Оптимизированное переключение платформы
- Герметичное соединение имплантата с абатментом
- Увеличение опорной зоны между абатментом и платформой имплантата
- Повышение точности
- Снижение микроподвижности
- Оптимальное сохранение костной ткани


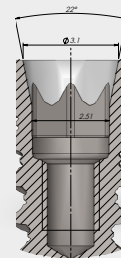


НОВИНКА! УПАКОВКА ИМПЛАНТАТА

Новая упаковка имплантата без имплантовода с оптимизированными отвёртками с захватом обеспечивает удобство в применении и максимальный комфорт благодаря улучшенной эргономике:

- Держатели снабжены цветовой кодировкой, что позволяет легко идентифицировать длину имплантата
- Уникальный дизайн позволяет укладывать упаковки друг на друга, экономя пространство, необходимое для хранения
- На этикетке указаны тип имплантата, его длина и тип соединения (маркировка IH – внутреннее шестигранное соединение, маркировка CS – стандартное коническое соединение)
- Благодаря отсутствию имплантовода в упаковке её применение полностью совместимо с протоколами хирургии через шаблон с использованием хирургического набора Guided Surgical Tool Kit (GSTK) компании Alpha-Bio Tec.

DFI: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ – ПРЯМЫЕ СВЁРЛА

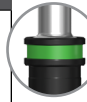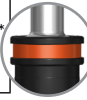Ø 3.3	Кость IV типа			Кость II и III типа			Кость I типа						
	Ø 2.0 	Ø 2.8 	Кортикально*	Ø 2.0 	Ø 2.8 		Ø 2.0 	Ø 2.8 	Ø 3.2 		Кортикально*		
Ø 3.75	Кость IV типа			Кость II и III типа			Кость I типа						
	Ø 2.0 	Ø 2.8 	Ø 3.2  Кортикально*	Ø 2.0 	Ø 2.8 	Ø 3.2 	Ø 2.0 	Ø 2.8 	Ø 3.2 		Ø 3.65  Кортикально*		
Ø 4.2	Кость IV типа				Кость II и III типа				Кость I типа				
	Ø 2.0 	Ø 2.8 	Ø 3.2 	Ø 3.65  Кортикально*	Ø 2.0 	Ø 2.8 	Ø 3.2 	Ø 3.65 	Ø 2.0 	Ø 2.8 	Ø 3.2 	Ø 3.65 	
Ø 5.0	Кость IV типа						Кость II и III типа						
	Ø 2.0 	Ø 2.8 	Ø 3.2 	Ø 3.65 	Ø 4.1 	Ø 4.5  Кортикально*	Ø 2.0 	Ø 2.8 	Ø 3.2 	Ø 3.65 	Ø 4.1 	Ø 4.5 	
	Твёрдая кость I типа												
	Ø 2.0 	Ø 2.8 	Ø 3.2 	Ø 3.65 	Ø 4.1 	Ø 4.5 	Ø 4.8  Кортикально*						


* Кортикально – Выполните сверление через кортикальную костную пластинку



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НОВИНКА! СТАНДАРТНОЕ КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ (CS)


Диаметр	Длина	Артикул CS	Размер			
			A	B	C	D
 Ø 3.75	8mm	1828	Ø3.85	Ø3	Ø2.1	Ø3.1
	10mm	1820	Ø3.85	Ø3	Ø2.1	Ø3.1
	11.5mm	1821	Ø3.85	Ø3	Ø2.1	Ø3.1
	13mm	1823	Ø3.85	Ø3	Ø2.1	Ø3.1
 Ø 4.2	8mm	1838	Ø4.2	Ø3	Ø2.2	Ø3.1
	10mm	1830	Ø4.2	Ø3	Ø2.2	Ø3.1
	11.5mm	1831	Ø4.2	Ø3	Ø2.2	Ø3.1
	13mm	1833	Ø4.2	Ø3	Ø2.2	Ø3.1
 Ø 5.0	8mm	1848	Ø4.95	Ø4.05	Ø3.1	Ø3.1
	10mm	1840	Ø4.95	Ø4.05	Ø3.1	Ø3.1
	11.5mm	1841	Ø4.95	Ø4.05	Ø3.1	Ø3.1
	13mm	1843	Ø4.95	Ø4.05	Ø3.1	Ø3.1

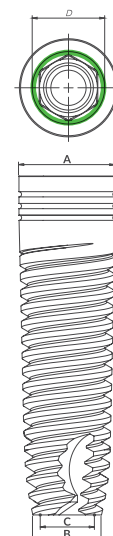

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ (IH)

Диаметр	Длина	Артикул IH	Размер			
			A	B	C	D
 Ø 3.3	8mm	1288	Ø3.7	Ø2.6	Ø2.1	Ø3.5
	10mm	1280	Ø3.7	Ø2.6	Ø2.1	Ø3.5
	11.5mm	1281	Ø3.7	Ø2.6	Ø2.1	Ø3.5
	13mm	1283	Ø3.7	Ø2.6	Ø2.1	Ø3.5
 Ø 3.75	8mm	1268	Ø3.85	Ø3	Ø2.1	Ø3.1
	10mm	1260	Ø3.85	Ø3	Ø2.1	Ø3.1
	11.5mm	1261	Ø3.85	Ø3	Ø2.1	Ø3.1
	13mm	1263	Ø3.85	Ø3	Ø2.1	Ø3.1
 Ø 4.2	8mm	1278	Ø4.2	Ø3	Ø2.2	Ø3.1
	10mm	1270	Ø4.2	Ø3	Ø2.2	Ø3.1
	11.5mm	1271	Ø4.2	Ø3	Ø2.2	Ø3.1
	13mm	1273	Ø4.2	Ø3	Ø2.2	Ø3.1
 Ø 5.0	8mm	1298	Ø4.95	Ø4.05	Ø3.1	Ø3.1
	10mm	1290	Ø4.95	Ø4.05	Ø3.1	Ø3.1
	11.5mm	1291	Ø4.95	Ø4.05	Ø3.1	Ø3.1
	13mm	1293	Ø4.95	Ø4.05	Ø3.1	Ø3.1

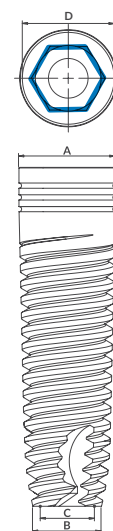

Alpha-Bio Tec's products are CE-marked in accordance with the Council Directive 93/42/EEC and Amendment 2007/47/EC. Alpha-Bio Tec complies with EN ISO 13485: 2012 and the Canadian Medical Devices Conformity Assessment System (CMDCAS). Product availability may vary between countries.

На нашем сайте по адресу www.alpha-bio.net вы всегда можете найти самые новые версии всех брошюр и буклетов